



13

Verwijderen UltraFrame®: begin bij het witte lijje van de UltraFrame®.



14

Trek deze evenwijdig aan de huid aan totdat de folie loskomt van de huid. Op deze manier rekt de folie uit waardoor de UltraFrame® eenvoudig te verwijderen is.



15

Pak vervolgens het losgelaten folie en herhaal deze handeling totdat de UltraFrame® in zijn geheel verwijderd is.

UltraFrame®



INSTRUCTIES

UltraFrame® extra zekerheid zonder concessies!



1
Het aanbrengen van de UltraFrame® bestaat uit meerdere handelingen. Volg daarom de nummering op de UltraFrame®.



2
Verwijder beschermfolie nr 1.




3
Bring de UltraFrame® aan. Deels op de huidplaat en deels op de huid.



7
Verwijder beschermfolie nr 3.




8
Wrijf met uw andere hand tegelijkertijd de UltraFrame® aan.

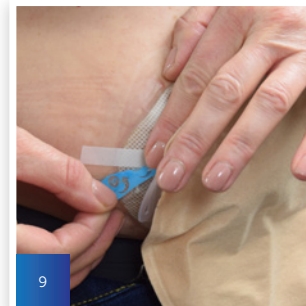

9
Verwijder beschermfolie nr 4. Let op: dit bestaat uit 2 delen.




4
Wrijf het midden van de UltraFrame® aan.

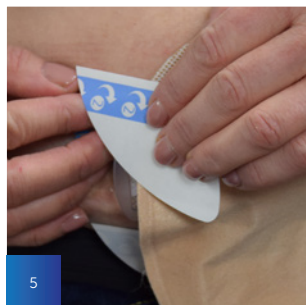

5
Verwijder beschermfolie nr 2.




6
Wrijf met uw andere hand tegelijkertijd de UltraFrame® aan.

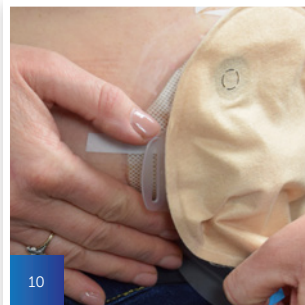

10
Wrijf met uw andere hand tegelijkertijd de UltraFrame® aan.



11
Verwijder met behulp van het witte lipje in het midden van de UltraFrame® het laatste gedeelte van de beschermfolie.

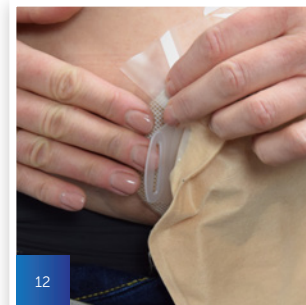

12
Wrijf met uw andere hand tegelijkertijd de UltraFrame® aan.