

# Easiflo™



# instructies

## Dé oplossing voor lekkages die 's nachts kunnen optreden door draaien tijdens de slaap

Met de Easiflo™ anti-twist connector (adapter voor koppeling van urinenachtzak aan een urinestomazakje) blijft de urine door de gaatjes gewoon de nachtzak in stromen.

Product	Per doos	Art. code
Easiflo	10	FSA900



1  
Verwijder de dop van de urinenachtzak.



2  
Sluit de Easiflo aan op de urinenachtzak.



3  
Verwijder de beschermhuls van de Easiflo en bewaar deze voor het schoonspoe-  
len.



7  
Verwijder de Easiflo door  
deze uit het urinestomazakje  
te trekken. Vergemakkelijk  
dit door de opening open te  
knijpen.



8  
Sluit het kraantje van het  
urinestomazakje.



9  
Bevestig de beschermhuls op  
de bovenzijde van de Easiflo.



4  
Open het kraantje van het  
urinestomazakje.



5  
Breng de Easiflo in het urine-  
stomazakje tot het laatste  
ribbeltje.




6  
De Easiflo is nu op de juiste  
wijze aan de urinenachtzak  
gekoppeld.



10  
Door de beschermhuls on-  
der de kraan te houden,  
kunt u zowel de Easiflo als  
de urinenachtzak eenvoud-  
dig schoonspoe-  
len.



11  
U kunt de Easiflo ook door-  
spoelen zonder de urine-  
nachtzak.

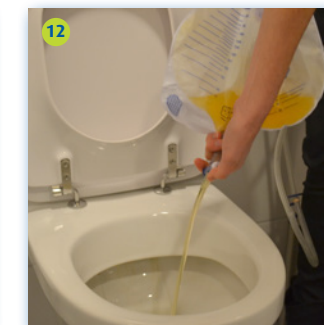

12  
Door middel van een  
eenvoudig te bedienen  
kraantje kunt u de urine-  
nachtzak legen in het toilet.