



**Aurum® Plus** 


**Voor stoma's die boven huidniveau liggen**

# 1-delig Aurum<sup>®</sup> Plus

Colostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Het Dual-Carb<sup>®</sup> 2 filter is een speciaal samengesteld koolstoffilter, ontworpen om geur te absorberen en gas door het filter te laten stromen om kans op ballooning te verkleinen
- ✓ Easy2peel<sup>™</sup> tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue

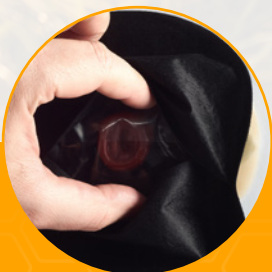

# Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 inhoudsmaten

## INHOUDSMAAT

Mini uitknipbaar (tot 50 mm bij 70 mm)



Mini

## INHOUDSMAAT

Midi uitknipbaar (tot 60 mm bij 80 mm)



Midi

## INHOUDSMAAT

Maxi uitknipbaar (tot 60 mm bij 80 mm)



Maxi

**i** Midi en Maxi zakjes: uitknipbare maten tevens verkrijgbaar in transparante versie

## Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



## Colostomie 1-delig / Manuka honing




### Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.



Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

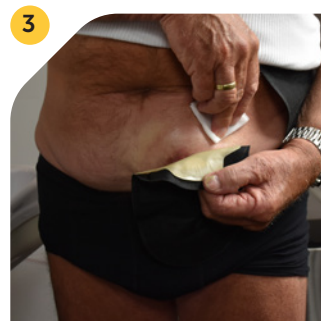

### Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.



Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.



### Aanbrengen methode 1

Vouw de huidplaat om vanaf de onderste rand van de opening. Streck, indien nodig, de huid boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.



### Aanbrengen methode 1

Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



### Aanbrengen methode 2

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd, indien nodig, de huid gestrekt.



### Aanbrengen methode 2

Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.





Product	Maat	Per doos	Mini Zwart	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Zwart	13 mm	30	X1C1A11s (tot 50 mm bij 70 mm)	X1C1A12s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1C1A13s (tot 60 mm bij 80 mm)
	20 mm	30	-	X1C1A1220	X1C1A1320
	25 mm	30	-	X1C1A1225	X1C1A1325
	29 mm	30	-	X1C1A1229	X1C1A1329
	32 mm	30	-	X1C1A1232	X1C1A1332
	35 mm	30	-	X1C1A1235	X1C1A1335
	38 mm	30	-	X1C1A1238	X1C1A1338
	44 mm	30	-	X1C1A1244	X1C1A1344

X Export - 1 Aurum Plus - C Closed - 1 1-delig - A vlak - 11 Mini Zwart (maat en kleur zakje) - s stansmaat

Product	Maat	Per doos	Mini Zand	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Zand	13 mm	30	X1C1A21s (tot 50 mm bij 70 mm)	X1C1A22s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1C1A23s (tot 60 mm bij 80 mm)
	20 mm	30	-	X1C1A2220	X1C1A2320
	25 mm	30	-	X1C1A2225	X1C1A2325
	29 mm	30	-	X1C1A2229	X1C1A2329
	32 mm	30	-	X1C1A2232	X1C1A2332
	35 mm	30	-	X1C1A2235	X1C1A2335
	38 mm	30	-	X1C1A2238	X1C1A2338
	44 mm	30	-	X1C1A2244	X1C1A2344
	Maat	Per doos		Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	30	-	X1C1A32s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1C1A33s (tot 60 mm bij 80 mm)

X Export - 1 Aurum Plus - C Closed - 1 1-delig - A vlak - 21 Mini Zand (maat en kleur zakje) - s stansmaat



Aurum<sup>®</sup> Plus 

The icon for Aurum Plus consists of three hexagons arranged in a small cluster: one white hexagon on the left, one black hexagon on the top right, and one white hexagon on the bottom right.

ISS01/202109