



Aurum® Plus 

Voor stoma's die boven huidniveau liggen

1-delig Aurum[®] Plus

Ileostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Dual-Carb^{®i} filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat ervoor zorgt dat de lucht vrij kan stromen door het filter en geurtjes worden geëlimineerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en olieachtige stoffen af om de kans op lekkage te verkleinen
- ✓ Gemakkelijk en gecontroleerd legen met een lipje
- ✓ Easy2peel[™] tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 inhoudsmaten

INHOUDSMAAT
Mini uitknipbaar (tot 50 mm x 70 mm)



Mini

INHOUDSMAAT
Midi uitknipbaar (tot 60 mm x 80 mm)



Midi

INHOUDSMAAT
Maxi uitknipbaar (tot 60 mm x 80 mm)



Maxi

i Midi en Maxi zakjes: uitknipbare maten tevens verkrijgbaar in transparante versie

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Ileostomie 1-delig / Manuka honing



1

Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.



2

Rol de sluiting van het zakje op tot aan het klittenband en wrijf het aan.



3

Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.



4


Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.



5

Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

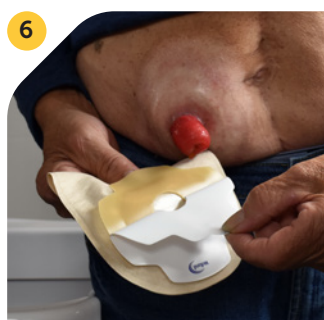

6

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.



7

Aanbrengen methode 1

Vouw de huidplaat om vanaf de onderste rand van de opening. Strek, indien nodig, de huid boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.



8

Aanbrengen methode 1

Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



9 Aanbrengen methode 2

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd, indien nodig, hierbij de huid gestrekt.



10 Aanbrengen methode 2

Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



11
Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



12
Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stoma naar de buitenranden goed op zijn plaats zit.



13



14

14
Legen
Gecontroleerd legen met het lipje.



15

15
Na het legen het uiteinde van het zakje oprollen.



16

16
Sluiting stevig aandrukken.



Product	Maat	Per doos	Mini Zwart	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Zwart	13 mm	30	X1D1A11s (tot 50 mm bij 70 mm)	X1D1A12s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1D1A13s (tot 60 mm bij 80 mm)
	20 mm	30	-	X1D1A1220	X1D1A1320
	25 mm	30	-	X1D1A1225	X1D1A1325
	29 mm	30	-	X1D1A1229	X1D1A1329
	32 mm	30	-	X1D1A1232	X1D1A1332
	35 mm	30	-	X1D1A1235	X1D1A1335
	38 mm	30	-	X1D1A1238	X1D1A1338
	44 mm	30	-	X1D1A1244	X1D1A1344

X Export - **1** Aurum Plus - **D** Drainable - **1** 1-delig - **A** vlak - **11** Mini Zwart (maat en kleur zakje) - **s** stansmaat

Product	Maat	Per doos	Mini Zand	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Zand	13 mm	30	X1D1A21s (tot 50 mm bij 70 mm)	X1D1A22s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1D1A23s (tot 60 mm bij 80 mm)
	20 mm	30	-	X1D1A2220	X1D1A2320
	25 mm	30	-	X1D1A2225	X1D1A2325
	29 mm	30	-	X1D1A2229	X1D1A2329
	32 mm	30	-	X1D1A2232	X1D1A2332
	35 mm	30	-	X1D1A2235	X1D1A2335
	38 mm	30	-	X1D1A2238	X1D1A2338
	44 mm	30	-	X1D1A2244	X1D1A2344
		Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans
	13 mm	30	-	X1D1A32s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1D1A33s (tot 60 mm bij 80 mm)

X Export - **1** Aurum Plus - **D** Drainable - **1** 1-delig - **A** vlak - **21** Mini Zand (maat en kleur zakje) - **s** stansmaat

Overzicht



Aurum[®] Plus 

The icon for Aurum Plus consists of three hexagons arranged in a triangular pattern. The top hexagon is dark grey, and the two bottom hexagons are white with black outlines.

ISS01/202110